

Пульт управления ReSound



Описание продукта

Пульт управления ReSound предназначен для клиентов, которые ценят прежде всего простоту и незаметность управления слуховыми аппаратами.

С его помощью можно легко переключать программы и регулировать громкость благодаря простым большим и эргономичным кнопкам. Выпуклые символы легко найти пальцем, даже не смотря на аксессуар. Этот аксессуар станет хорошим решением для людей с нарушенной моторикой рук.

Пульт управления ReSound имеет небольшой размер и обладает элегантным дизайном. Он поместится в любую сумку, карман или ладонь, словно ключи от машины, и хорошо будет смотреться на столе с другими аксессуарами.

Технические характеристики

Размеры	73 x 35 x 14 мм
Вес	22.5 г
Источник питания	CR2032 Литиевая батарея типа "таблетка"
Количество устройств	2 слуховых аппарата на 1 ПДУ
Частота	2.4 ГГц
Диапазон работы	Примерно на расстоянии вытянутой руки
Скорость соединения	2 Мбит/с
Номинальная мощность передатчика	Max. +4 дБм, соответствует всем современным стандартам
Устойчивость к ЭСР	+/- 4 кВ контактный. +/- 8 кV воздушный.
Температура эксплуатации	от 0 до 55 °C
Температура хранения	от -20 до +60 °C

ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Чтобы установить сопряжение со слуховыми аппаратами, нажмите на кнопку сопряжения на задней части аксессуара, откройте и закройте батарейные отсеки слуховых аппаратов в течение 20 секунд.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Вы можете переключать программы одним нажатием кнопки на пульте управления.
- Громкость слуховых аппаратов регулируется нажатием на кнопки + и - .
- Стандартная литиевая батарея типа "таблетка" CR2032 широко распространена и ее легко заменить.

Worldwide Headquarters

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715